

Ohjeita poskiharjatestien tekijälle ja teettäjälle

- Minimi-ikä koiranpennun testaukselle on 4 viikkoa
 - Pennut voidaan testata vasta imetyksen päätyttyä
 - Harjaukset voi tehdä vasta 2 tunnin kuluttua koiran ruokailusta
1. Jokaista testattavaa koira varten on kaksi näyteharjaa ja paperikirjekuori ja englanninkieliset ohjeet muovipussissa.
 2. testaja: laita kertakäyttöhanskat käteesi, ettei harjoihin eksy vierasta DNA:ta.
 3. Ota harjat pois pakkauksesta ja aseta ne esim. puhtaaseen kertakäyttömukiin tai talouspaperin päälle. Ole huolellinen, etteivät harjat pääse koskettamaan esim. ihmisihoa.
 4. Jos sinulla on useita testattavia koiria, on mukiin tai talouspaperiin hyvä kirjoittaa esim. 4 viimeistä numeroa sirusta tai koiran kutsumanimi, jotta harjat eivät mene sekaisin.
 5. Harjojen **suojamuovipussin**, missä harjat, ohje ja paperikirjekuori ovat, voit heittää roskeen.
 6. Pyöritä kumpikin harja peräjälkeen pehmeästi koiran suussa koko posken laajuudesta ainakin 20 kertaa. Harjan tulisi näyttää samalta testauksen jälkeen kuin ennen testiä, eikä siinä siis saa olla **näkyviä** poskesta peräisin olevia soluja, verta tms. **Ilmakuivata harjat!!!!**
 7. Tämä käy kätevästi asettamalla harjat pystyyn käytössä olevaan kertakäyttömukiin tai talous-/käsipaperin päälle pölyttömään ja ilmavaan tilaan noin 15-30 minuutiksi. Jos harjat jäävät kosteiksi, voi niihin pesiytyvä bakteeri- ja sienikasvu tuhota koko näytteen DNA:n.
 8. **Kirjoita testikitin mukana tulleeeseen kirjekuoreen** (jos siinä ei ole valmiiksi jo laittamaani tarraa) **täsmälleen sama tiedot**, mitä on tilauslähetteessäkin: koirasi virallinen nimi, rekisterinumero, sirunumero ja 'Web reference' -numero, joka löytyy lähetteestä.

'Nimettömiä' kuoria ei AHT:n järjestelmä pysty käsittelemään, vaikka lähetekin olisi kuoren mukana ja vaikka kyse olisi vain yhdestä koirasta, minkä vuoksi **koiran tietojen kirjaaminen samassa muodossa myös kirjekuoreen, mitä on läheteessä on äärimmäisen tärkeää!!!**

Jos joudut lisäämään jotain läheteeseen (esim. rekisterinumeron, jonka olet saanut vasta testin tilaamisen jälkeen), ilmoita siitä testin tilaajalle heti testauksen jälkeen tai jos olet itse tilannut testit, ilmoita muutos AHT:lle.

9. Kuivattelun jälkeen laita **molemmat** harjat kertakäyttöhanskoilla testikitin mukana tulleeeseen paperikirjekuoreen. Harjakuorta **ei saa teipata** kiinni! On tärkeää, että **vain harjat** palautetaan vahingoittumattomina pienen paperisen kirjekuoren sisällä!
10. Toista kohdat 2.- 8. jokaisen testattavan koiran kohdalla, ja testaajan tulee muistaa vaihtaa uudet kertakäyttöhanskat käteensä aina testattavan koiran vaihtuessa
11. Sulje itseliimautuvat paperikirjekuoret ja pidä eri koirien harjanäytteet huolellisesti järjestyksessä. Kirjekuoria, joissa on vain yksi harja, ei tulla hyväksymään tutkittavaksi!
12. Pyydä eläinlääkäriäsi täyttämään lähetteen alaosan tiedot (myös säpo-osoite). Huomioithan, että vain siruidentifioidut ja eläinlääkärin valvonnassa otetut testit ovat ns. virallisia. Jos et kuitenkaan halua tulosta virallisena, voit 'harjata' koirasi myös itse näiden ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ LAITA PIENEEN PAPERIKIRJEKUOREEN MITÄÄN MUUTA KUIN VAIN KAKSI KOIRALLESII KÄYTTÄMÄÄSI NÄYTEHARJAA!!!!

Kun kaikki testiharjat ovat valmiina pienissä paperikirjekuorissa, postita ne **suoraan AHT:lle** esim. postin pehmustetussa kirjekuoreessa **lähetteen kera** osoitteeseen:

Genetic Services, Centre for Preventive Medicine,
Animal Health Trust, Kentford, Newmarket, Suffolk, CB8 7UU, United Kingdom